



おいしい!

Minerich Neo Royal


健康にこだわると家族に!

アルカリイオン水と酸性水、
カラダにうれしい2つの水。



カラダに
いい!

美容に
いい!

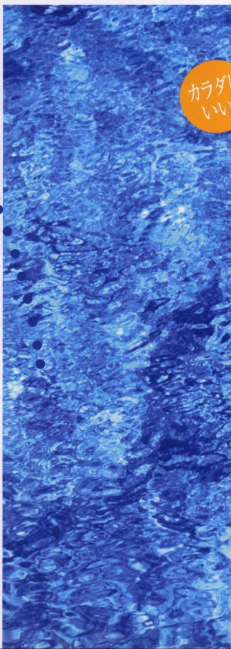

ミネリッチ ネオロイヤル

家庭用流水型アルカリイオン整水器

本器は医療用物質生成器として認可 [医薬用具承認番号 213006ZZ00345000]
を受けており、以下の効能・効果が認められています。

【効能・効果】

- アルカリイオン水(陰極水): 飲用して慢性下痢・消化不良・胃腸内異常発酵・制酸・胃腸過多に有効です。
- 酸性水(陽極水): 弱酸性のアストリンゼント(化粧水)として美容用に用いられます。

Minerich Neo



ミネリッチ ネオロイヤル


家庭用流水型アルカリイオン整水器

健康にこだわると家族に!

アルカリイオン水と酸性水、
カラダにうれしい2つの水。

もともと日本は、おいしく安全な水をいつでも自由に使うことができる、水の豊富な国でした。ところが、近年さまざまな理由で良質の水を手に入れることが難しくなっています。浄水器の普及は、こうした水事情の変化によるものです。

「ミネリッチネオロイヤル」は浄水機能できれいな水をつくり、さらにおいしい水「いわば、生きた水」をつくることができます。水を電気分解することによりカラダにうれしい2つの水、アルカリイオン水と酸性水を同時につくりだす「ミネリッチネオロイヤル」は、健康にこだわるご家庭の必需品。

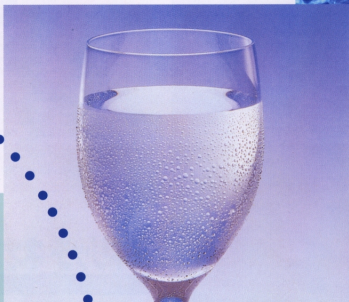

毎日のことだから
カンタン操作の据え置きタイプ

特長

1. シンプルなデザインの据え置きタイプ
2. カンタン操作（押しボタン）
3. 浄水時に排水が無い（捨水不要）
4. 豊富な水量（アルカリイオン水）
5. 抗菌活性炭と中空糸膜のろ過



Royal

おいしい!

ミネラル類や酸素、炭酸ガスなどが適度に含まれたアルカリイオン水は、まろやかでとてもおいしく、コーヒーやお茶、料理の味をグッと引き立てます。

胃腸にやさしい アルカリイオン水。



カラダに
いい!

アルカリイオン水は、胃腸にやさしく、胃腸内異常発酵・胃酸過多・消化不良・慢性下痢・制酸に効果があります。

美容に
いい!

酸性水には、お肌をひきしめるアストリンゼント効果があり、洗顔後や入浴後の美容水としてお使いいただけます。その他、天ぷらの衣づくりに、食器・野菜の洗いうち水、めん類のゆで水等にもご利用ください。

肌にやさしい 酸性水。



良質の水をたっぷりと使いたい。そんなご家族の願いを実現しました。
タイプ。浄水時に排水がない経済機能。1分間に4Lの豊富な水量。トリハロメタン除去8,000Lの高性能。

反置きタイプ
式、デジタル表示)で使いやすい
て水が無い)
ン水:4L・酸性水:1L 0.2MPa時)
2重ろ過で、浄水能力が高い

6. 1日40L使用で1年間の長寿命(水質により異なることがあります)
7. 分岐栓は、3ポジション(原水ストレート・シャワー・浄水ストレート)で機能的
8. 蛇口から使えるリターン方式により、シンクの側に置かなくても使用できます
9. 自動洗浄方式により、お手入れカンタン
10. 環境問題に配慮した環境にやさしい製品です




ミネリッチ ネオロイアル

家庭用流水型アルカリイオン整水器

操作パネルについて


表示ランプ

生成水のpHレベルや、
器械の状態を表示し
ます。

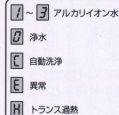

pHの目安	レベル	pH
1	8.0~8.5	
2	8.5~9.0	
3	9.0~9.5	

※この値は目安であり、ご使用になる
地域の水质により異なります。

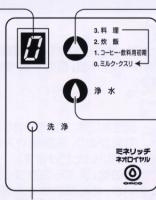

仕様

製 品 名	マイオム NDX-211H ミネリッチ ネオロイアル
型 式	家庭用流水型アルカリイオン整水器 (据置きタイプ)
使 用 水	水道水または、飲用適用水
使用圧力 (静水圧)	0.07~0.5MPa
使 用 水 温	0~35℃ (凍結無きこと)
使 用 環 境 温 度	0~50℃
定 格	AC100V 3A 50/60Hz
重 量	約8kg (本体乾燥時)
生成水能力 (0.2MPa時)	アルカリ 4.0L/分 酸性水 1.0L/分 * 浄水時 5.0L/分
電 解 し べ ル	4段階 (浄水・電解1~3)
自動電極洗浄システム	電解使用時間により定期的に逆電洗浄
サ イ ズ	W 217.5 X D 173 X H 352 (mm)
浄 水 性 能	過濾量 (動水E0.2MPa) 5.0L/分 残留塩素除去能力 (2mg/L) 15,000L 総トリハロメタン除去能力 8,000L 濁りろ過能力 (2度) 25,000L * カートリッジ交換方式 (抗菌活性炭+中空糸膜)
安 全 装 置	過電流保護機能、過昇温度保護機能
販 売 価 格	198,000円 (税別)
カートリッジ販売価格	(6BG II) 18,000円 (税別)
	* 取付費、薬液洗浄等別途費用がかかる場合があります

お問い合わせ

お問い合わせ

メンテナンスシステム

コンピュータ管理によるカートリッジ交換システム
おいしい水をお届けして30年。当社では、購入日や機種種
など、お客様のデータをコンピュータで管理し、カートリッジ
の交換時期にはお電話でご連絡、定期交換のお知らせとご
都合のよい交換日時をご相談させていただきます。また、交
換には当社・販売代理店のスタッフが直接ご訪問。交換はも
ちろん、責任をもって点検するメンテナンスシステムです。
(サービスエリアのみ) サービスエリア外についてはカート
リッジを郵送させていただきます。詳しくはフリーダイヤル
でお尋ねください。

OSGコンシューマーセンター

OSGコンシューマーセンターでは、専任のスタッフが30年
に及ぶノウハウを活かして皆さまのご相談にお応じます。
交換時期など「ミネリッチ ネオロイアル」についてお気軽に
ご相談ください。
●転売等ご購入品になる場合は、前もってフリーダイヤル
にお知らせください。

お問い合わせ
0120-065-417

受付時間/平日10:00~17:00(土・日・祭日は休み)

ご購入前の注意

- 本器は日本国内でご使用ください。
- 本器は飲用可能な水を対象としております。
- 本器は寒冷地仕様ではありません。
凍結防止の対策をしてください。
- 水质 (地下水・温泉水・塩分・炭酸を含む) などによっては、
十分なpH (ペーハー)値が得られない場合があります。
- ご購入後は取扱説明書をお読みの上、正しくお使いください。
- 安全のために必ずお守りください。
- 次のような方は医師または薬剤師にご相談してください。

- 妊娠中の方、授乳中の方
- 腎臓病の方、または身体が弱っている方
- 持病のある方、または身体が弱っている方
- 妊娠・育児・介護中の方
- 医師または歯科医師の指導を受けている方

- 酸性水をお使いになる場合は次のことにご注意ください。
- 目の痛み・アレルギー体質の方は使用前に医師にご相談ください。

ご使用上の注意

- 水道法の水质基準に適合する水をご使用ください。
- カートリッジの寿命は使用水量、水质、水圧によって異なります。

総販売元

株式会社 **OSGコーポレーション**

東京都千代田区千代田 千代田区千代田2-1-4 OSG第4ビル
TEL 03-3795-8371 (代表)

大阪本社 〒530-0043 大阪市北区天満1-26-3 OSG本社ビル
TEL 06-6357-0101 (代表)

ホームページ <http://www.osg-nandemonet.co.jp/>

